

CA10FS

Návod k obsluze





**Digitální detektor alkoholu
s elektrochemickým senzorem**

Popis detektoru



Výměna baterií

Stiskněte kryt baterie na zadní straně přístroje a zatlačte směrem dolů pro uvolnění dle vyobrazení.

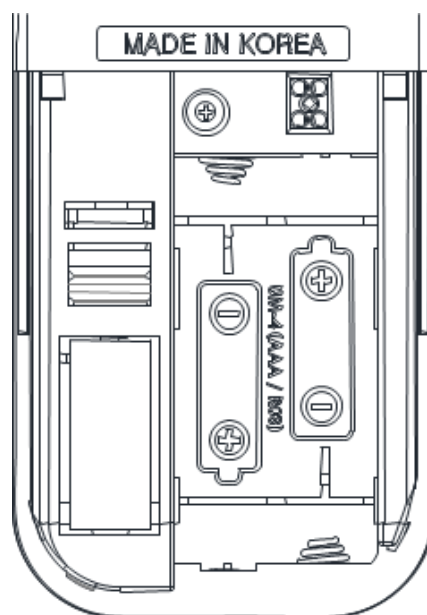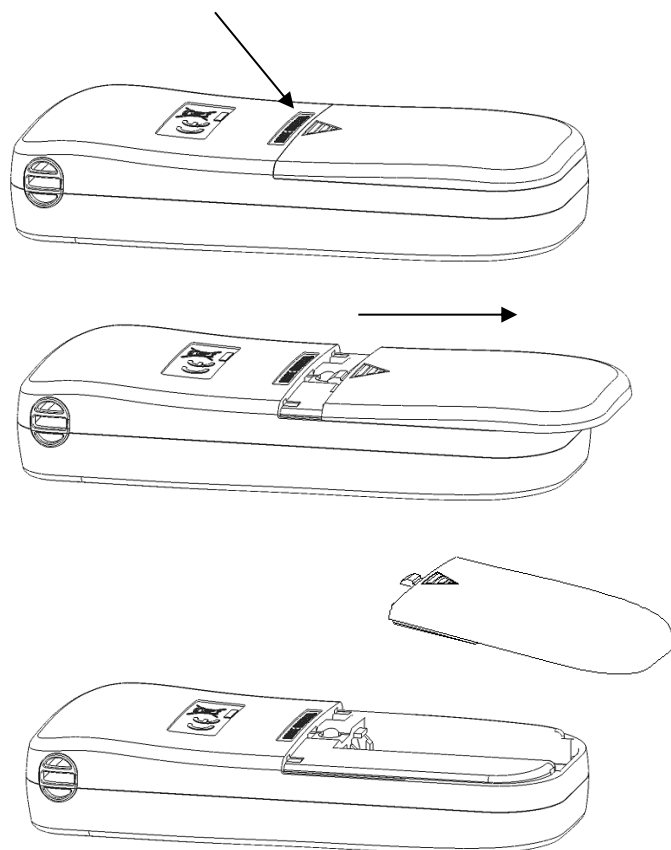

Dbejte na správné vložení baterií dle polarity, nesprávné vložení může poškodit tester !!!
Používejte jen alkalické baterie nedobíjecí !!!

Displej

Výsledek testu se zobrazí v promilích



Zelená LED se rozsvítí, když je zařízení připraveno pro testování a také když je výsledek měření pod 0,5 promile. Řiďte se číselnými údaji na displeji



READY



BATT
LOW



WARN

Pokud je výsledek vyšší než 0,50 ‰
Červená LED se rozsvítí

Žlutá LED bude blikat, když je napětí baterie nízké
Vyměňte 1.5V alkalické baterie.
Nepoužívejte dobíjecí baterie !

Postup měření

Pro dosažení správných výsledků čtěte návod a pečlivě dodržujte postup měření.

Návod k obsluze:

1. Nasaďte náustek
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF, začne odpočítávání na displeji, což je zahřívací proces senzoru 15 –35 sekund.

První zobrazené číslo na displeji po zapnutí uvádí počet zkoušek.

3. Až uslyšíte zvukový signál a na displeji se zobrazí nápis blo foukejte rázně do náustku po celou dobu, než se ukončí zvukový signál, to znamená, že můžete ukončit foukání. Nezakrývejte výstup měřeného vzduchu.

Pokud nezačnete foukat do 20 sekund přístroj se automaticky vypne.

4. Po dobu 3 – 20 sekund se výsledek měření vyhodnocuje a pak zůstane výsledek na displeji 30sekund.

Pokud je výsledek 0,5 promile a větší zobrazí se nápis WARN, bude slyšet výstražný zvukový signál a displej se podbarví do červena.

























5. Nakonec se přístroj automaticky vypne se zvukem.

6. Další zkoušku opakujte dle bodů 2– 5.

7. Mezi jednotlivými zkouškami udělejte přestávku alespoň 2 minuty.



Hlášení na displeji

Nápis na displeji		Nápis na displeji	
    READY BATT LOW WARN	<p>Pokud je výsledek zkoušky 0,50 promile a vyšší, zobrazí se nápis WARN se zvukovým signálem</p>	    READY BATT LOW WARN	<p>Při nízkém napětí baterie se zobrazí nápis bat vyměňte 1,5V alkalické baterie NEPOUŽÍVEJTE DOBÍJECÍ BATERIE !!!</p>
    READY BATT LOW WARN	<p>Pokud je výsledek zkoušky vyšší než 4,00 promile zobrazí se nápis Hot se zvukovým signálem. Nepoužívejte přístroj ihned po požití alkoholu, vyčkejte min. 20 minut</p>	    READY BATT LOW WARN	<p>Nápis Flo se zobrazí při krátké době foukání do přístroje. Foukejte do přístroje min. 3 sekundy Stiskněte tlačítko On/Off pro provedení dalšího testu</p>
    READY BATT LOW WARN	<p>500 měření zobrazí se nápis CAL je nutná kalibrace. Kalibrace je nutná po půl roce nebo po 500 měřeních, co nastane dříve.</p>	    READY BATT LOW WARN	<p>Pokud je okolní teplota mimo rozsah teploty (5 - 40 C), zobrazí se nápis Out a přístroj se vypne. Udržujte a používejte přístroj v doporučeném rozsahu teplot</p>

Podmínky používání

Přístroj je určen pro orientační dechovou zkoušku, analyzuje koncentraci alkoholu v krvi přesně, nepoužívejte jej však jako nástroj k pití a řízení

Provedení testu se doporučuje 20 minut po vypití a po kouření nejméně 1 minutu.

Do přístroje nefoukejte cigaretový kouř ani tekutiny, zničí se senzor.

Test neprovádějte na silném větru nebo v uzavřené místnosti s kontaminovaným vzduchem.

Když se zobrazí „BAT“ vyměňte 1,5V pouze alkalické baterie.

Nepoužívejte dobíjecí baterie!

Udržujte přístroj při teplotě 0 – 40 stupňů Celsia a mimo dosah dětí.

Při manipulaci s krytem baterie věnujte zvýšenou pozornost zpětnému zasunutí víčka!!!

CA10FS vyžaduje kalibraci každých 6 měsíců nebo po provedení 500 testů pro dodržení přesných výsledků.

Prodávající nezaručuje možné odchylky v měření u prodávaného přístroje a přístrojů jiných typů a značek.



Technické údaje

Měřicí rozsah: 0,0 – 4,0 ‰
Rozměry: 114 × 47 × 24 mm.
Hmotnost: 61,5g. 84g vč.baterií
Baterie: 2ks 1,5V alkalické baterie vel.AA
Senzor: elektrochemický
Doba zahřátí: 15 – 35 sekund
Čas měření: 3-22 sekund.
Pracovní teplota: 5 – 40 stupňů Celsia
Skladovací teplota: 0 – 40 stupňů Celsia
Přesnost: +/- 10%

Kalibrace: BAC simulátor, tel. **+420541210101**, email. **info@altest.cz**



Záruka

Poskytujeme záruku na výrobní a materiálové vady výrobku (vyjma kalibrace) při běžném provozu po dobu 24 měsíců od zakoupení.

V průběhu této záruky je výměna, nebo oprava přístroje, jestliže byl současně dodán doklad o koupi. Tato záruka ztrácí platnost, jestliže byl výrobek neodborně opravován nebo poškozen nedodržením návodu k obsluze.

Při nedodržení termínu kalibrace ztrácí uživatel veškerou záruku.